

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORTEGO DYNAMIC / ORTEGO DYNAMIC KID

ver. 06/2021

Ortezy ORTEGO są wykonywane na indywidualne zamówienie, z najwyższą starannością i wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Satysfakcja pacjentów jest naszym priorytetem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@ortego.pl lub bezpośredni z naszym ortotykiem.

OPIS WYROBU:

ORTEGO Dynamic / ORTEGO Dynamic KID jest ortezą typu DAFO, korygującą zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej. Znajduje szerokie zastosowanie w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i po urazach ortopedycznych. Zabezpiecza przed wystąpieniem lub progresją zmian strukturalnych w obrębie kończyny dolnej, koryguje wzorzec chodu, a także ustawienie stopy i podudzia w płaszczyźnie czołowej.

UWAGI:

- Ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, fizjoterapeuty lub rehabilitanta.
- Orteza po raz pierwszy powinna być zakładana i dopasowywana przez wykwalifikowany personel medyczny.
- Nie należy zakładać ortozy bezpośrednio na skórę. Orteza powinna być zakładana na bawełnianą skarpetkę.
- Przed użyciem ortozy należy szczegółowo przeczytać instrukcję.
- Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania ortozy przez dzieci, osoby z zaburzeniami czucia, zaburzeniami pamięci i chore psychicznie.
- Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków czyszczących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną podatnością i rozwojem flory bakteryjnej. Jeśli podczas właściwego użytkowania ortozy odczuwasz dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Wskazania do stosowania:

Przeciwdziałanie zaburzeniom chodu.
Wystąpienie zaburzeń wzorca chodu w przebiegu chorób neurologicznych.
Wystąpienie zmian strukturalnych w obrębie kończyny dolnej.
Stopa płaska koślawa.

Przeciwwskazania do stosowania:

Zaburzenia krążenia i czucia w obrębie stosowania ortozy.
Zmiany skórne i obrzęki limfatyczne.
Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające korzystanie z ortozy.
Nadmierna podatność w obrębie kończyny dolnej.

Zakładanie ortozy:

Po raz pierwszy orteza powinna być założona i dopasowana przez wydającego sprzęt ortotyka.
Przed nałożeniem ortozy należy rozpiąć i poluzować paski rzepowe, a następnie umieścić stopę w ortezie w taki sposób, aby pięta była dobrze osadzona na swoim miejscu w ortezie. Paski rzepowe należy zapiąć mocno, ale tak, by nie ograniczały krążenia i nie powodowały dyskomfortu u użytkownika. Po prawidłowym założeniu ortozy, na stopę pacjenta w ortezie zakładamy but.

Konserwacja:

- w celu wyczyszczenia ortozy należy przetrzeć ją wilgotną szmatką z mydłem
- chronić przed wilgocią
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury i promieni słonecznych
- suszyć z dala od źródeł ciepła

Nazwa i adres wytwórcy:

Ortego Zaopatrzenie ortopedyczne Maciej Stępień
ul. Hozjusza 11
11-041 Olsztyn