

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORTEGO HAND

ver. 01/2024

**Ortezy ORTEGO są wykonywane na indywidualne zamówienie, z najwyższą starannością i wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Satysfakcja pacjentów jest naszym priorytetem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@ortego.pl lub bezpośrednio z naszym ortotykiem.**

### OPIS WYROBU:

ORTEGO Hand jest ortezą typu WHO, obejmującą dłoń i przedramię. Znajduje szerokie zastosowanie w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i po urazach ortopedycznych. Koryguje ustawienie dłoni i nadgarstka. Zabezpiecza przed wystąpieniem lub progresją zmian strukturalnych w obrębie kończyny górnej.

Występuje w dwóch wariantach:

- bez przegubów
- z przegubami

### UWAGI:

- Ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, fizjoterapeuty lub rehabilitanta.
- Orteza po raz pierwszy powinna być zakładana i dopasowywana przez wykwalifikowany personel medyczny.
- Przed użyciem ortozy należy szczegółowo przeczytać instrukcję.
- Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania ortozy przez dzieci, osoby z zaburzeniami czucia, zaburzeniami pamięci i chore psychicznie.
- Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków czyszczących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Jeśli podczas właściwego użytkowania ortozy odczuwasz dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

### Wskazania do stosowania:

Zaburzenia na tle neurologicznym w napięciu mięśniowym w obrębie kończyny górnej.  
Urazy ortopedyczne.

### Przeciwwskazania do stosowania:

Zaburzenia krążenia i czucia w obrębie stosowania ortozy.  
Zmiany skórne i obrzęki limfatyczne.  
Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające korzystanie z ortozy.  
Nadmierna potliwość w obrębie kończyny górnej.

### Zakładanie ortozy:

Po raz pierwszy orteza powinna być założona i dopasowana przez wydającego sprzęt ortotyka.  
W celu założenia ortozy należy umieścić dłoń i przedramię w ortezie oraz zapiąć paski mocno, ale tak, by nie ograniczały krążenia i nie powodowały dyskomfortu u użytkownika.

### Konserwacja:

- w celu wyczyszczenia ortozy należy przetrzeć ją wilgotną szmatką z mydłem
- chronić przed wilgocią
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury i promieni słonecznych
- suszyć z dala od źródeł ciepła

### Nazwa i adres wytwórcy:

Ortego Zaopatrzenie ortopedyczne Maciej Stępień  
ul. Hozjusza 11  
11-041 Olsztyn