

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORTEGO HIP

ver. 01/2024

Ortezy ORTEGO są wykonywane na indywidualne zamówienie, z najwyższą starannością i wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Satysfakcja pacjentów jest naszym priorytetem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@ortego.pl lub bezpośredni z naszym ortotykiem.

OPIS WYROBU:

ORTEGO Hip jest ortezą typu HKAFO, obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy. Znajduje szerokie zastosowanie w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i po urazach ortopedycznych. Zabezpiecza przed wystąpieniem lub progresją zmian strukturalnych w obrębie kończyny dolnej, koryguje wzorzec chodu. Umożliwia pionizację pacjenta w przypadku znacznie osłabionej siły mięśniowej lub całkowitego porażenia.

Występuje w trzech wariantach:

- bez przegubów
- z przegubami
- multifunkcyjna, posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub redresji, lub wspomagania lokomocji

UWAGI:

- Ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, fizjoterapeuty lub rehabilitanta.
- Orteza po raz pierwszy powinna być zakładana i dopasowywana przez wykwalifikowany personel medyczny.
- Nie należy zakładać ortozy bezpośrednio na skórę. Orteza powinna być zakładana na bawełnianą skarpetkę i/lub bawełnianą odzież.
- Przed użyciem ortozy należy szczegółowo przeczytać instrukcję.
- Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania ortozy przez dzieci, osoby z zaburzeniami czucia, zaburzeniami pamięci i chore psychicznie.
- Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków czyszczących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Jeśli podczas właściwego użytkowania ortozy odczuwasz dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Wskazania do stosowania:

Znaczne osłabienie lub całkowita utrata siły mięśniowej w obrębie kończyn dolnych. Słaba kontrola posturalna tułowia lub jej brak.

Wystąpienie zmian strukturalnych w obrębie kończyny dolnej.

Przeciwwskazania do stosowania:

Zaburzenia krążenia w obrębie stosowania ortozy.

Zmiany skórne i obrzęki limfatyczne.

Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające korzystanie z ortozy.

Zakładanie ortozy:

Po raz pierwszy orteza powinna być założona i dopasowana przez wydającego sprzęt ortotyka. Każdorazowo założenie ortozy powinno się odbywać w asyście osoby towarzyszącej.

Przed nałożeniem ortozy należy rozpiąć i poluzować paski rzepowe, zamki i elementy ruchome, ustawić stawy kolanowe i biodrowe ortozy w zgięciu 90° i zabezpieczyć ją w taki sposób, aby po umieszczeniu w niej pacjenta nie przewróciła się. Następnie należy umieścić pacjenta w ortezie, najlepiej w pozycji siedzącej, w taki sposób, aby pięta, stawy kolanowe i biodrowe były dobrze osadzone w odpowiednich miejscach. Paski rzepowe i/lub zamki należy zapiąć mocno, ale tak, by nie ograniczały krążenia i nie powodowały dyskomfortu u użytkownika.

Po prawidłowym założeniu ortozy można pionizować pacjenta.

Konserwacja:

- w celu wyczyszczenia ortozy należy przetrzeć ją wilgotną szmatką z mydłem
- chronić przed wilgocią
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury i promieni słonecznych
- suszyć z dala od źródeł ciepła

Nazwa i adres wytwórcy:

Ortego Zaopatrzenie ortopedyczne Maciej Stępień
ul. Hozjusza 11
11-041 Olsztyn